

## 「AED (iPAD NF1200) のバッテリー交換要領」

1. 使用済みのバッテリーパックを取り出します。

ラッチを互いの方向に押し、ロックを解除し、同時にバッテリーパックを AED 本体から引き出します。

※ラッチは開け難い場合があります。  
iPAD NF1200 を落としてしまったときに偶発的に開いてしまうのを防ぐために、ラッチを堅くしてあります。



2. ラベルを上に向け、ラベルに印刷されている矢印で示されている方向に、新しい電池パックを差し込みます。



3. ラッチがカチッという音が聞こえるまで、いっぱいに押し込みます。



4. バッテリーパックを差し込むと、iPAD NF1200 は電池の差し込みテストを行います。このテストには、ショックボタンと i ボタンの機能テストが含まれます。

iPAD NF1200 は次の音声ガイダンスを発します。

「点滅しているオレンジボタンを押してください。」

「点滅している青い i ボタンを押してください。」

音声ガイダンスの指示に従って、ショックボタンと i ボタンを 1 回ずつ押します。

5. 交換時期の変更シールを表示ラベルの該当箇所に貼ってください。



※ 交換後の古いバッテリーは、各自治体の処分方法に従い、貴社にて処分して頂きますようお願い申し上げます。