

## 6.2 メンテナンス作業

### 6.2.1 機器の点検・検査

機器にはセルフテスト機能が搭載されています。バッテリーパックが装着されると機器は直ちにセルフテストを実施し、テストが完了すると自動的にオフになり、周期的に起動して毎日、毎週、4週毎にセルフテストを実施します。



#### 注意

機器を毎日点検して、常に緊急時に使用できる状態を保持してください。本体ステータスインジケータを見て、機器本体、バッテリーパックおよび電極パッドの状態にエラーがないことを確認してください。

本体ステータスインジケータに関する詳細は、[8.2章: 機器のステータス]を参照してください。

### 6.2.2 消耗品の交換


バッテリーパックの残量がない場合や、電極パッドの有効期限が過ぎたときなどの場合は、それぞれ新品と交換してください。

#### 使い捨てバッテリーパックの点検と交換


- バッテリーパックの残量をチェックしてください。チェック法は、[第8章:トラブルシューティング]を参照してください。
- バッテリーパックの残量が切れたら、新しいバッテリーパックと交換してください。
- 使用済みのバッテリーパックは地域の規則に従って廃棄してください。
- 当社が推奨し提供するバッテリーパックのみを使用してください。
- バッテリーパックは使い捨てです。再充電しないでください。

#### 使い捨てバッテリーパックの装着法


1. 下図のように、機器下部のロックを押しながら、残量がなくなったバッテリーパックを取り外します。

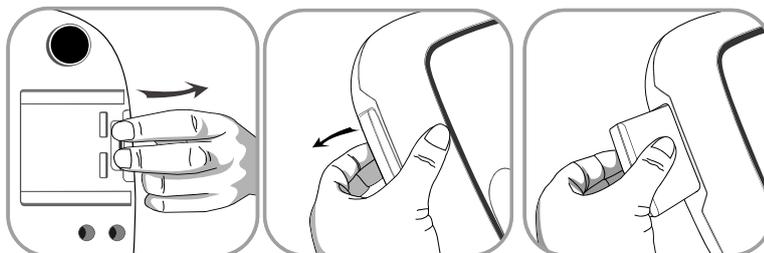

2. 図のように、ラベルを上に向けながら矢印の方向にバッテリーパックを装着します。

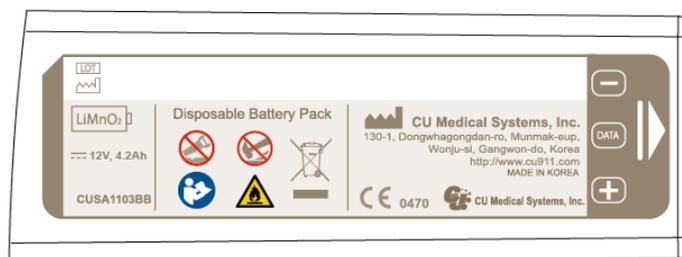

3. クリック音が聞こえるまで、バッテリーパックを差し込んで所定の位置にセットします。

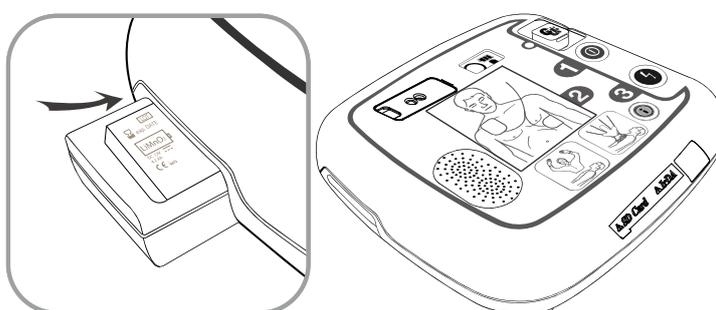

### 注意

#### バッテリーパックの取扱い上の注意

- 強い衝撃を与えないこと。
- 直火や熱い物体に触れないようにすること。
- 直射日光が当たる場所に保管しないこと。
- 湿気の多い場所に保管しないこと。
- 開けたり、分解したりしないこと。
- 端子をショートさせないこと。
- 絶対に再充電しないこと。
- 子供の手の届く場所に置かないこと。
- 漏出物が目に入ったら、直ちに水で目を洗い、医師の診察を受けること。
- 破壊したり焼却したりしないこと。
- 廃棄するときは、地域の規則に従うこと。